




## Anleitung zum Antigen-Selbsttest in 6 Schritten

# 1.

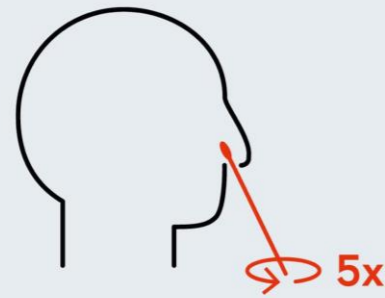


Tupfer ca. **2,5 cm in das Nasenloch** einführen und diesen **5 Mal drehen**, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen.

Den Vorgang im **anderen Nasenloch wiederholen**.



## Anleitung zum Antigen-Selbsttest in 6 Schritten

# 2.

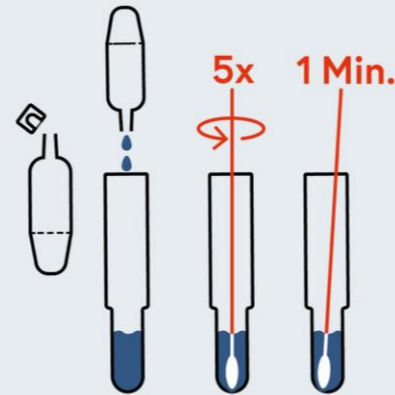


Deckel der Testflüssigkeit abschrauben und die **gesamte Flüssigkeit in das Proberöhrchen** einfüllen. Den Tupfer einführen und **5 Mal drehen**. Den Tupfer **1 Minute** im Probenröhrchen belassen.



## Anleitung zum Antigen-Selbsttest in 6 Schritten

# 3.

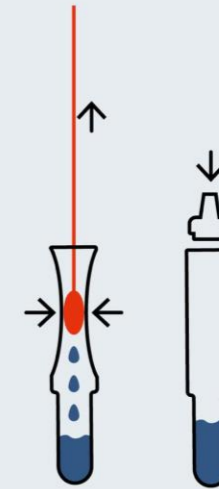


Tupfer **entnehmen** und dabei das Röhrchen **zusammendrücken**. Die **Tropferspitze aufsetzen**.



## Anleitung zum Antigen-Selbsttest in 6 Schritten

# 4.

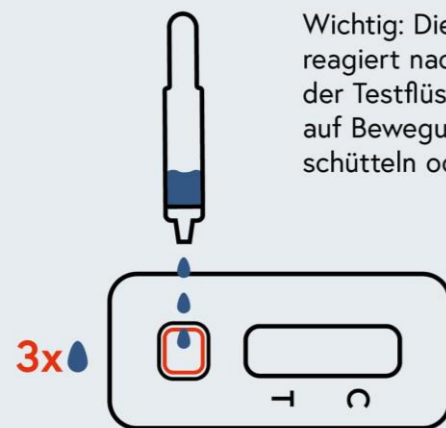


Wichtig: Die Testkassette reagiert nach dem Auftropfen der Testflüssigkeit sensibel auf Bewegung. Nicht drehen, schütteln oder bewegen!

Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf eine Oberfläche legen. **3 Tropfen aus dem Röhrchen auf die Testkassette tropfen**.



## Anleitung zum Antigen-Selbsttest in 6 Schritten

# 5.

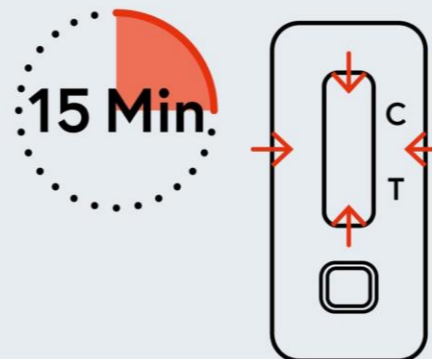


**15 Minuten warten** und danach das Ergebnis ablesen.



## Anleitung zum Antigen-Selbsttest in 6 Schritten

# 6.

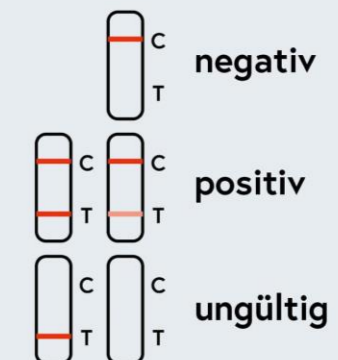

**Negativ?**  
Bleib gesund!

**Positiv?**  
1450 anrufen!

**Das Ergebnis interpretieren.**